

INTERCEPT CU22™ Medizinischer Mund-Nasen-Schutz CHM Advanced (inkl. med. Wechselfilter)

- Gebrauchsanweisung für den Medizinischen Mund-Nasen-Schutz Typ II -

Verpackungsinhalt: Set bestehend aus 1 Medizinischen Mund-Nasen-Schutz,
1 Medizinischen Wechselfilter, 2 Silikon-Kordelstoppfern,
1 wiederverwendbarer Beutel zur Aufbewahrung (dieser Beutel
ist gleichzeitig die Verpackung des Sets) und 1 Beipackzettel

Bitte lesen Sie die nachfolgende Gebrauchsanweisung vor der erstmaligen Benutzung des Produkts vollständig und aufmerksam durch, um Fehler bei der Verwendung des Produkts zu vermeiden.

Bevor Sie die Maske erstmals benutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Desinfizieren Sie Ihre Hände oder waschen sie die Hände unter fließendem Wasser mit Seife (mindestens für 20-30 Sekunden).
2. Legen Sie den INTERCEPT CU22™ Medizinischen Wechselfilter vor der erstmaligen Benutzung in den dafür vorgesehenen Einschub des INTERCEPT CU22™ Medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ein, indem Sie diesen in der Mitte leicht falten (siehe Anleitung 1). Die kupferfarbene, bedruckte Seite des Filters muss dabei nach außen, die weiße Seite ohne Bedruckung zum Nutzer hin, zeigen.
3. Führen Sie die Gummis an den beiden Enden der Maske je durch einen Silikon-Kordelstopper, sodass Sie die Länge der Gummibänder variieren können (siehe Anleitung 2).
4. Platzieren Sie den INTERCEPT CU22™ Medizinischen Mund-Nasen-Schutz vom Typ II auf Ihrem Gesicht. Achten Sie hierbei bitte auf folgende Dinge:
 - a) ziehen Sie den Medizinischen Mund-Nasen-Schutz richtig herum auf: die mittig platzierte, schmalere Vernähung mit Nasenbügel gehört auf die Nase, die breitere Vernähung ist für das Kinn gedacht. Der Aufdruck auf der Außenseite der Maske darf nicht auf den Kopf gestellt sein.
 - b) platzieren Sie den Medizinischen Mund-Nasen-Schutz so auf Ihrem Gesicht, dass Mund und Nase komplett bedeckt sind.

1

Anleitung 1: den Filter richtig in die Maske einlegen

	<p>Vorbereitung</p> <p>Zum Zusammenfügen der Maske benötigen Sie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. einen INTERCEPT CU22™ Medizinischen Mund-Nasen-Schutz 2. einen INTERCEPT CU22™ Medizinischen Wechselfilter
	<p>1. Schritt</p> <p>Bitte desinfizieren Sie vor dem Zusammenbauen Ihres Mund-Nasen-Schutzes Ihre Hände oder waschen Sie die Hände gründlich mit Seife.</p>
	<p>2. Schritt</p> <p>Falten Sie den Filter mit der rechten Hand in der Mitte nach oben. Heben Sie die eingenähte Tasche der Maske mit der linken Hand an.</p>
	<p>3. Schritt</p> <p>Schieben Sie nun den gefalteten Filter zwischen eingnähte Tasche und Maske.</p>
	<p>4. Schritt</p> <p>Mit der linken Hand heben Sie nun die andere Seite der Tasche an und schieben den Filter vorsichtig in die Mitte der Maske und platzieren ihn dort. Anschließend falten Sie den Filter wieder auf.</p>

3

- c) Wenn der Medizinische Mund-Nasen-Schutz richtig sitzt, halten Sie diese mit einer Hand fest und führen Sie mit der anderen Hand die Gummibänder mit den Silikon-Kordelstoppfern hinter Ihre Ohren.
- d) Justieren Sie die Gummis mit den Silikon-Kordelstoppfern hinter jedem Ohr auf die passende Länge, sodass der Medizinische Mund-Nasen-Schutz angenehm, aber nicht zu straff sitzt.
- e) Achten Sie beim Auf- und Absetzen des Medizinischen Mund-Nasen-Schutzes darauf, dass sich keine Haare in den Kordelstoppfern verfangen.
- f) Passen Sie mit beiden Händen den Nasenbügel an Ihren Nasenrücken an, bis der Medizinische Mund-Nasen-Schutz bequem sitzt und abdichtet. Wenn Sie die Anpassung nur mit einer Hand vornehmen, könnte die Leistung der Maske weniger wirkungsvoll sein.
- g) Sie können nun Ihre Tätigkeit mit dem Medizinischen Mund-Nasen-Schutz beginnen.

Nachdem Sie Ihre Tätigkeit beendet haben und den INTERCEPT CU22™ Medizinischen Mund-Nasen-Schutz ausziehen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

5. Schieben Sie die beiden Silikon-Kordelstopper auf den Gummibändern nach hinten, sodass Sie die Gummis von den Ohren entfernen können. Setzen Sie den Medizinischen Mund-Nasen-Schutz ab. Vermeiden Sie dabei eine Berührung der Außenseite des Medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Die Außenseite des Medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist potenziell erregert und kann zu einer Kontamination der Hände führen.
6. Verstauen Sie den Medizinischen Mund-Nasen-Schutz mit allen Zubehör-Teilen (Silikon-Kordelstopper, medizinischer Wechselfilter) im INTERCEPT CU22™ Beutel. Das Verpackungsmaterial sorgt durch seine Kontaktwirkung für eine Abtötung von potentiellen Krankheitserregern. Der medizinische Wechselfilter kann bei der Lagerung in der Maske verbleiben.
7. Nach dem Absetzen des Medizinischen Mund-Nasen-Schutzes sollten die Hände unter fließendem Wasser mit Seife gewaschen werden (mindestens für 20-30 Sekunden).
8. Lagern Sie den Medizinische Mund-Nasen-Schutz an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur. Set bitte für Kinder unzugänglich verwahren - Kleinteile können verschluckt werden.

2

Zweckbestimmung

Der INTERCEPT CU22™ Medizinische Mund-Nasen-Schutz hat den Zweck, die Geschwindigkeit des Atemstroms und den Tröpfchenauswurf zu verringern. Somit werden Dritte geschützt. Durch die Durchleitung des Atemstroms durch einen mit Kupferpolymeren beschichteten Filter wird zudem ein begrenzter Eigenschutz sichergestellt, da dieser Bakterien und Viren filtriert und inaktiviert.

Der INTERCEPT CU22™ Medizinische Mund-Nasen-Schutz wurde für den Einsatz im privaten und medizinischen Umfeld entwickelt und konzipiert. Das Produkt kann in geschlossenen Räumen und im Freien getragen werden.

Die Maske ist für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet. Bitte verwenden Sie die Maske nicht, wenn Sie unter folgendem leiden:

- krankhaft verminderte Lungenfunktion oder
- symptomatisch instabile angina pectoris.

Allgemeine Produkthinweise und Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch

Verwenden Sie bitte nur intakte Masken mit Filter. Defekte Produkte entsprechen nicht mehr den geprüften Eigenschaften und sind zu entsorgen.

Die Masken und der Filter müssen trocken und bei Raumtemperatur gelagert werden. Eine durchfeuchtete Maske darf nicht benutzt werden und ist umgehend auszutauschen. Der Filter ist vor der erstmaligen Benutzung in die Maske einzulegen.

Der Filter ist für eine durchschnittliche Tragedauer von 30 Tagen* konzipiert und ist danach auszutauschen. Nach der Nutzung ist der Filter über den Hausmüll zu entsorgen.

Die Maske dient Ihrem Schutz sowie dem Schutz Dritter und erfüllt diese Funktion nur in Kombination mit dem Filter.

Bitte beachten Sie, dass der empfohlene Sicherheitsabstand und die allgemeine gängigen Hygieneregeln des RKI trotzdem zu befolgen sind! Diese finden Sie unter: www.rki.de.

Beim Aufsetzen der Maske sollte beachtet werden, dass Maske nicht auf der Innenseite angefasst werden sollen, da die Hände mit Krankheitserregern kontaminiert sein könnten. Die Hände sollten deshalb vor dem Anlegen gründlich mit Seife gewaschen werden.

Die Maske muss richtig über Mund, Nasen und Wangen gezogen werden und an den Seiten eng anliegen, damit sichergestellt wird, dass keine Luft an den Seiten hereinströmt.

Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske den persönlichen Bedürfnissen des Trägers entspricht.

Die Außenseite der Maske ist potenziell erregert. Um eine Kontamination der Hände zu verhindern, sollte diese wenn möglich nicht berührt werden.

* Bei einer durchschnittlichen, ununterbrochenen Tragedauer von 8 Stunden pro Tag.

4

Nach dem Absetzen der Maske sollten die Hände unter fließendem Wasser mit Seife gewaschen werden (mindestens für 20-30 Sekunden).

Die Maske ist bei 60 °C waschbar. Es wird empfohlen, die Maske in regelmäßigen Abständen (1x pro Woche) zu waschen und im INTERCEPT CU22™ Beutel zu verwahren, wenn diese nicht in Benutzung ist. Die weiteren Waschinweise sind zu beachten. Maske und Filter dürfen nicht in der Mikrowelle gereinigt oder getrocknet werden. Bewahren Sie die Maske und den Filter bei Nichtbenutzung in der Verpackung aus INTERCEPT CU22™-Folie auf.

Es wird empfohlen, besondere Nutzergruppen wie Kinder, ältere Personen sowie Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung im Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz zu unterstützen, um die korrekte Verwendung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Warnhinweise

Bei auftretender Atemnot muss die Maske mit Filter unverzüglich abgesetzt und ggf. ein Arzt aufgesucht werden.

Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.

Kleinteile können verschluckt werden. Achtung: Erstickungsgefahr!

Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Überzeugen Sie sich stets, dass der INTERCEPT CU22™ Medizinische Mund-Nasen-Schutz folgende Voraussetzungen erfüllt. Er muss:

- für die Anwendung geeignet sein.
- korrekt sitzen.
- während der gesamten Dauer der Anwendung getragen werden.
- bei Bedarf ausgetauscht werden.

Die Maske darf nicht geändert oder repariert werden. Defekte Masken sind zu entsorgen.

Beschädigen Sie den Filter nicht durch mechanische oder sonstige Einwirkung. Der Filter ist genau auf die Größe der Maske angepasst. Es ist nicht notwendig, den Filter mit einem Messer, einer Schere oder Sonstigem zuzuschneiden.

Wenn die Gebrauchshinweise für den INTERCEPT CU22™ Medizinischen Mund-Nasen-Schutz nicht ordnungsgemäß befolgt werden und/ oder das Produkt nicht die ganze Zeit während der Anwendung getragen wird, so kann keine ordnungsgemäße Funktionsweise gewährleistet werden.

Gesichtshaare im Maskenbereich können sich als hinderlich für den Sitz der Maske erweisen und die Abdichtung gefährden.

5

Waschinweise

Der Medizinische Mund-Nasen-Schutz besteht zu 100% aus Polyester.

Folgende Waschinweise sind zu beachten:

- der Mund-Nasen-Schutz ist vor der erstmaligen Benutzung zu waschen
- Maske ohne Filter waschen, der Filter ist ein Einmalprodukt und kann nicht gewaschen werden
- Maske mit ähnlichen Farben bei maximal 60°C waschen (a)
- Maske nicht chemisch reinigen (b)
- Maske nicht bleichen (c)
- Maske nicht heiß/ im Wäschetrockner trocknen (d)
- Maske möglichst ohne Dampf bei niedriger Hitze bügeln (e), der Filter darf nicht gebügelt werden
- die Maske ist für insgesamt 30 Wäschen ausgelegt und sollte danach durch eine neue ersetzt werden
- Maske und Filter können nicht in der Mikrowelle gereinigt oder getrocknet werden



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

Weitere Hinweise:

Symbol	Erläuterung
	Hersteller: C.H. Müller GmbH, Gewerberg 1, D-08468 Heinsdorfergrund
	Jahr der Herstellung: 2021
	Verwendbar bis: 3 Jahre verwendbar ab Herstellungsjahr
	Chargennummer: siehe Maske bzw. Filter
	Das Produkt ist vor Sonnenlicht zu schützen. Der Beutel aus INTERCEPT CU22™-Folie könnte anderenfalls spröde werden und seine Wirkweise verlieren.
	Das Produkt ist an einem trockenen Ort aufzubewahren und muss gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Es ist vorstellbar, dass Feuchtigkeit zu einer Oxidation des Kupfers führt. Somit könnte die Wirkung des Filters nicht mehr sichergestellt werden.
	Temperaturbegrenzung: Das Medizinprodukt darf in einem Temperaturbereich von -10°C bis +50°C verwendet werden.
	Der Medizinische Filter ist für eine durchschnittliche Tragedauer von 30 Tagen* konzipiert, danach nicht wiederverwendbar und durch einen neuen Filter zu ersetzen. Der alte Filter ist im Hausmüll zu entsorgen.
	Diese Gebrauchsanweisung ist zu beachten.
	Achtung: Bitte beachten Sie wichtige sicherheitsbezogene Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind und aus einer Vielzahl von Gründen nicht auf dem Produkt selbst angebracht werden können.

* Bei einer durchschnittlichen, ununterbrochenen Tragedauer von 8 Stunden pro Tag.

7

Anleitung 2: die Silikon-Kordelstopper richtig auffädeln

Vorbereitung

Zum Auffädeln der Kordelstopper benötigen Sie:

1. einen INTERCEPT CU22™ Medizinischen Mund-Nasen-Schutz
2. zwei Silikon-Kordelstopper
3. eine Büroklammer

1. Schritt

Biegen Sie die Büroklammer wie dargestellt auf und fädeln Sie den ersten der beiden Kordelstopper auf die schmalere Seite der Büroklammer.

2. Schritt

Schieben Sie den Kordelstopper auf der Büroklammer nach hinten.

3. Schritt

Fädeln Sie das Gummiband mittig über die Büroklammer und halten Sie es straff.

4. Schritt

Schieben Sie nun den Kordelstopper auf der Büroklammer über beide Drähte zurück und platzieren Sie diesen auf dem Gummiband.

5. Schritt

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem Kordelstopper auf der anderen Seite der Maske. Anschließend können Sie die Maske aufziehen und die Länge der Gummibänder final einstellen.

6

8